

STRATADERM (Tratamento de Cicatrizes)

01. DESCRIÇÃO E INDICAÇÕES

O Strataderm é um gel de silicone não estéril indicado para o tratamento de cicatrizes de todos os tipos (recentes e antigas). É ideal para pós-cirúrgicos como abdominoplastias, cesarianas, cirurgias plásticas, traumas e marcas de acne.

02. MECANISMO DE AÇÃO

O gel forma uma película protetora que hidrata a cicatriz e normaliza a síntese de colágeno. Atua suavizando e nivelando cicatrizes elevadas, além de aliviar a coceira, o desconforto e reduzir a vermelhidão associada.

03. BENEFÍCIOS PRINCIPAIS

- **Eficácia:** Previne queloides e cicatrizes hipertróficas.
- **Praticidade:** Secagem rápida, não pegajoso e permite o uso de maquiagem ou protetor solar por cima após seco.
- **Segurança:** Seguro para crianças, gestantes e peles sensíveis.

04. MODO DE USO

1. Lave e seque a cicatriz.
2. Aplique uma camada fina sobre a área.
3. Deixe secar por 3 a 4 minutos.
4. Use continuamente (24h/dia).

05. DURAÇÃO E CUIDADOS

O tratamento mínimo recomendado é de 60 a 90 dias. Não aplicar em feridas abertas.

Distribuidor Oficial em MG: Humanus Medica

 **Telefone/WhatsApp para pedidos:** (31) 2526-3200

 **Instagram:** @hsemedica

 **Site:** www.medica.humanusbr.com