

STRATAMED (Tratamento de Feridas Abertas)

01. DESCRIÇÃO E INDICAÇÕES

O Stratamed é um curativo em gel de silicone estéril avançado para a prevenção de cicatrizes e tratamento imediato de feridas abertas. Pode ser aplicado logo após cirurgias, tratamentos a laser, queimaduras superficiais e peelings químicos.

02. MECANISMO DE AÇÃO

Cria um ambiente ideal para a cicatrização ao manter a hidratação e proteger a ferida de agentes químicos e microbianos. Favorece uma reepitelização mais rápida e reduz drasticamente a resposta inflamatória, prevenindo a formação de queloides desde o primeiro dia.

03. BENEFÍCIOS PRINCIPAIS

- **Uso Imediato:** Pode ser aplicado sobre incisões e feridas abertas.
- **Alívio Sintomático:** Reduz a dor, coceira e o desconforto da pele lesada.
- **Proteção:** Cria uma barreira física estéril e flexível.

04. MODO DE USO

1. Limpe a ferida.
2. Aplique uma camada fina do gel diretamente sobre a área.
3. Aguarde a secagem (5 a 6 minutos).
4. Pode ser coberto com curativo secundário, se necessário.

05. DURAÇÃO E CUIDADOS

Uso recomendado para os 14 primeiros dias após uma cirurgia podendo estender de 60 a 90 dias para feridas crônicas ou conforme orientação médica. Se houver sinais de infecção, interrompa e consulte um profissional.

Distribuidor Oficial em MG: Humanus Medica

 **Telefone/WhatsApp para pedidos:** (31) 2526-3200

 **Instagram:** @hsemedica

 **Site:** www.medica.humanusbr.com